



Oxivir Plus

Reinigings- en desinfectiemiddel voor niet-poreuze harde oppervlakken

Omschrijving

Diversey Oxivir Plus (toelatingsnummer BE-REG-00866) is een breedspectrumreiniger en desinfectiemiddel voor niet-poreuze harde oppervlakken.

Eigenschappen

- Bacteriedodend, virusdoden (omhulde virussen), gistdodend en schimmeldodend op:
 - a. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 - b. oppervlakken en apparaten in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg;
 - c. oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.
- Geotrooieerde zure formulering op basis van waterstofperoxide
- Korte contacttijden
- Effectieve reiniger
- Geurvrij

Voordelen

- Uitgebreid getest volgens de Europese normen en effectief tegen meerdere ziekteverwekkers, waaronder HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE en Norovirus.
- Reinigt en desinfecteert in één stap, wat de werktijd verkort.
- Uitstekende reinigingsprestaties, waaronder ontkalking en kalkbeperking, wat voorreinigen overbodig maakt.
- Goed veiligheidsprofiel voor de gebruiker.
- De AHP-formulering is mild voor oppervlakken wat de levensduur van apparatuur verlengt.
- Goed milieuprofiel. Wordt actief afgebroken in zuurstof en water.


Gebruiksaanwijzing

Sprayreiniging en -desinfectie:

1. Grove vervuilingen verwijderen.
2. Aanbrengen op oppervlakken door ofwel eerst op een doek te vernevelen en hiermee het oppervlak schoon te vegen of door rechtstreeks op het oppervlak te vernevelen met behulp van een spraykop.
3. Na de contacttijd ofwel droogwrijven of laten drogen aan de lucht.

Reinigen en desinfecteren met emmer:

1. Grove vervuilingen verwijderen.
2. Aanbrengen op oppervlakken met dweil/doek.
3. Na de contacttijd ofwel droogwrijven of laten drogen aan de lucht.
4. De oplossing vervangen als deze zichtbaar vervuild is of minstens om de 24 uur.

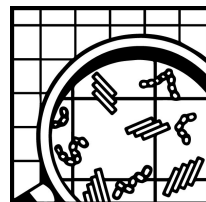

© A.I.S.E



Oxivir Plus

Dosering

4,5% om desinfectieclaims te behalen (45 ml voor 1L-oplossing).

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

Overige oppervlakken buiten gezondheidszorg:

- Bacteriedodend, gistdodend en actief tegen omhulde virussen volgens EN1276, EN1650, EN13697 en EN14476
- Gebruiksaanwijzing: **4,5 %** - zonder voorafgaande reiniging aanbrengen en 5 minuten laten inwerken op harde, niet-poreuze oppervlakken
- Voor extra fungicide activiteit moet de contacttijd verhoogd worden tot 15 minuten.

Oppervlakken in ziekenhuizen en overige instelling in de gezondheidszorg:

- Bacteriedodend, gistdodend en actief tegen omhulde virussen volgens EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN13697 en EN14476
- Gebruiksaanwijzing: **4,5 %** - zonder voorafgaande reiniging aanbrengen en 5 minuten laten inwerken op harde, niet-poreuze oppervlakken
- Voor extra fungicide activiteit moet de contacttijd verhoogd worden tot 15 minuten.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, gele vloeistof
pH waarde (onverdund): < 2
pH waarde (verdund): ~ 2
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Niet mengen met andere producten. Geen warm water gebruiken. Niet gebruiken op water- of zuurgevoelige oppervlakken. Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Diversey Oxivir Plus geschikt voor gebruik op de meeste gangbare materialen.

Microbiologische gegevens

Werkzaamheid bewezen met naleving van de Europese normen. Opgenomen op de VAH-lijst.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de eis van de EU-verordening inzake detergenten, EG 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101104828	DI Oxivir Plus 2x5L B	Manuele dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 19/04/2022 nl-BE (K00231)