



Oxivir Plus Spray

Reinigings- en desinfectiemiddel voor niet-poreuze harde oppervlakken

Omschrijving


Diversey Oxivir Plus Spray (toelatingsnummer BE-REG-00865) is een kant-en-klaar reinigingsmiddel voor gebruik op harde, niet-poreuze oppervlakken en sommige zachte meubelen.

Eigenschappen

- Bacteriedodend, virusdoden (omhulde virussen), gistdodend en schimmeldodend op:
 - a. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
 - b. oppervlakken en apparaten in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg;
 - c. oppervlakken in de cosmetische en farmaceutische industrie.
- Geotrooieerde zure formulering op basis van waterstofperoxide
- Korte contacttijden
- Effectieve reiniger
- Geurvrij

Voordelen

- Uitgebreid getest volgens de Europese normen en effectief tegen meerdere ziekteverwekkers, waaronder HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE en Norovirus.
- Reinigt en desinfecteert in één stap, wat de werktijd verkort.
- Uitstekende reinigingsprestaties, waaronder ontkalking en kalkbeperking, wat voorreinigen overbodig maakt.
- Goed veiligheidsprofiel voor de gebruiker.
- De AHP-formulering is mild voor oppervlakken wat de levensduur van apparatuur verlengt.
- Goed milieuprofiel. Wordt actief afgebroken in zuurstof en water.
- Geschikt voor gebruik in risicogebieden in de gezondheidszorg, waaronder operatiekamers, intensieve zorgen, intensieve zorgen voor pasgeborenen en patiëntenkamers.

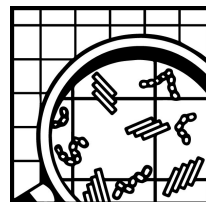

© A.I.S.E



Oxivir Plus Spray

Gebruiksaanwijzing

Sprayreiniging en -desinfectie:

1. Verontreinigde oppervlakken vooraf grondig schoonmaken en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.
2. Oxivir Plus Spray wordt aangebracht door op het oppervlak te vernevelen en met een doek in te wrijven.
3. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven.
4. Na afloop van de inwerktijd het behandelde oppervlak laten opdrogen of droogwrijven met een doek.
5. Bij bestrijden van virussen in ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg de te desinfecteren oppervlakken altijd vooraf schoonmaken.

Minimale inwerktijd:

Overige oppervlakken buiten gezondheidszorg

- Gebruiksaanwijzing: zonder voorafgaande reiniging aanbrengen en 15 minuten laten inwerken op harde oppervlakken en niet-poreuze oppervlakken.
- PT2 (Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt).
- Bacteriedodend, gisdodend, fungicide en actief tegen omhulde virussen volgens EN1276, EN1650, EN13697 en EN14476.

Oppervlakken in ziekenhuizen en overige instelling in de gezondheidszorg

- Gebruiksaanwijzing: zonder voorafgaande reiniging aanbrengen en 5 minuten laten inwerken op harde oppervlakken en niet-poreuze oppervlakken.
- Voor extra fungicide activiteit moet de contacttijd verhoogd worden tot 15 minuten.
- Bacteriedodend, gisdodend en actief tegen omhulde virussen volgens EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN13697 en EN14476.

Dosering

Oxivir Plus Spray is klaar voor gebruik, geen verdunning vereist.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, gele vloeistof
pH waarde (onverdund): < 2
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1,00

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Niet mengen met andere producten. Geen warm water gebruiken. Niet gebruiken op water- of zuurgevoelige oppervlakken. Onder de aanbevolen gebruiksomstandigheden is Diversey Oxivir Plus Spray geschikt voor gebruik op de meeste gangbare materialen.

Microbiologische gegevens

Werkzaamheid bewezen met naleving van de Europese normen. Opgenomen op de VAH-lijst.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de eis van de EU-verordening inzake detergenten, EG 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
101104744	DI Oxivir Plus Spray 6x0.75L B	Klaar voor gebruik

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 25/04/2022 nl-BE (K00092)