



Oxivir Plus

Détergent et désinfectant pour les surfaces dures non poreuses

Description

Diversey Oxivir Plus (numéro d'autorisation BE-REG-00866) est un détergent et un désinfectant à large spectre pour les surfaces dures non poreuses.

Propriétés principales

- Bactéricide, virucide (virus enveloppés), levuricide et fongicide sur:
 - a. Les surfaces dans les zones destinées au séjour de personnes ;
 - b. Les surfaces et équipements dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé ;
 - c. Les surfaces dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.
- Formulation acide brevetée à base de peroxyde d'hydrogène
- Temps de contact courts
- Nettoyant efficace
- Sans odeur

Avantages

- Testé de manière approfondie par rapport aux normes européennes et efficace contre de multiples agents pathogènes tels que le VIH, le VHB, le VHC, la grippe aviaire, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE et Norovirus.
- Nettoie et désinfecte en une seule étape, ce qui réduit le temps de travail.
- Excellente performance de nettoyage, y compris le détartrage et la limitation du calcaire, ce qui élimine la nécessité d'un pré-nettoyage.
- Bon profil de sécurité pour l'utilisateur.
- La formule AHP est douce pour les surfaces, ce qui prolonge la durée de vie des équipements.
- Bon profil environnemental. Le principe actif se décompose en oxygène et en eau.


Mode d'emploi

Nettoyage et désinfection par pulvérisation:

1. Enlever les grosses salissures.
2. Appliquer sur les surfaces soit en pulvérisant le chiffon et en essuyant les surfaces, soit en appliquant directement sur la surface à l'aide d'un pulvérisateur à gâchette.
3. Après le temps de contact, essuyer ou laisser sécher à l'air libre.

Nettoyage et désinfection au seau:

1. Enlever les grosses salissures.
2. Appliquer au mop/chiffon sur les surfaces.
3. Après le temps de contact, essuyer ou laisser sécher à l'air libre.
4. Remplacer la solution si elle est visiblement souillée ou au moins toutes les 24 heures.

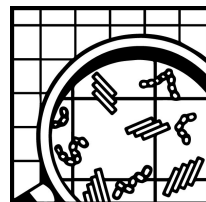

© A.I.S.E



Oxivir Plus

Dosage

4,5% pour garantir la désinfection revendiquée (45ml pour 1L de solution).

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Application

Autres surfaces non liées aux soins de santé:

- Bactéricide, levuricide et actif contre les virus enveloppés selon les normes EN1276, EN1650, EN13697 et EN14476.
- Mode d'emploi : **4,5 %** - appliquer sans nettoyage préalable et laisser agir pendant 5 minutes sur les surfaces dures et non poreuses.
- Pour une activité fongicide supplémentaire, augmenter le temps de contact à 15 minutes.

Surfaces dans les hôpitaux et les autres établissements de soins de santé:

- Bactéricide, levuricide et actif contre les virus enveloppés selon les normes EN1276, EN13727, EN1650, EN13624, EN13697 et EN14476.
- Mode d'emploi : **4,5 %** - appliquer sans nettoyage préalable et laisser agir pendant 5 minutes sur les surfaces dures et non poreuses.
- Pour une activité fongicide supplémentaire, augmenter le temps de contact à 15 minutes.

Données techniques

Aspect: Liquide limpide, jaune
Valeur pH (pur): < 2
Valeur pH (dilué): ~ 2
Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser d'eau chaude. Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles à l'eau ou à l'acide. Dans les conditions d'utilisation recommandées, Diversey Oxivir Plus convient à la plupart des matériaux courants.

Données microbiologiques

Efficacité prouvée dans le respect des normes européennes. Repris dans la liste VAH.

Information environnementale

Les agents tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément aux exigences du règlement relatif aux détergents CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
101104828	DI Oxivir Plus 2x5L B	En général: dosage manuel

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 19/04/2022 fr-BE (K00231)